

Tipy k odečtu výsledku

Pro jistý odečet rozhoduje **čas**, **světlo** a **podklad**. Níže máš rychlý postup a reálnou ukázkou zbarvení pro porovnání se stupnicí.

Odečet: **3-5 min**

Neodečítat **> 10 min** po

Denní světlo + bílý podklad

Než začnete

- Připravte si **bílý podklad** (papír / bílý stůl).
- Ideálně **denní světlo** (žluté světlo zkresluje).
- Nachystejte **stopky** (telefon).

Při odečtu

- Odečítejte po **3-5 minutách**.
- Po **> 10 minutách** už odstín nemusí odpovídat - berte jako **nejasný odečet**.
- Porovnávejte se stupnicí ve **stejném světle**.
- Dejte pozor na **stín** (ruka, lampička, okno za zády).

Tip: Když váháš mezi dvěma odstíny, vyber nejbližší políčko a zvaž **opakování testu ve správných podmínkách**.


Nejčastější chyby

- Odečet mimo okno **3-5 min** (hlavně pozdě).
- Žluté/teplé světlo, barevné LED.
- Tmavý nebo barevný podklad.
- Fotka/porovnání až „později“.

Stáhnout PDF tipy k odečtu

Zobrazit galerii výsledků

Zpět na vyhodnocení

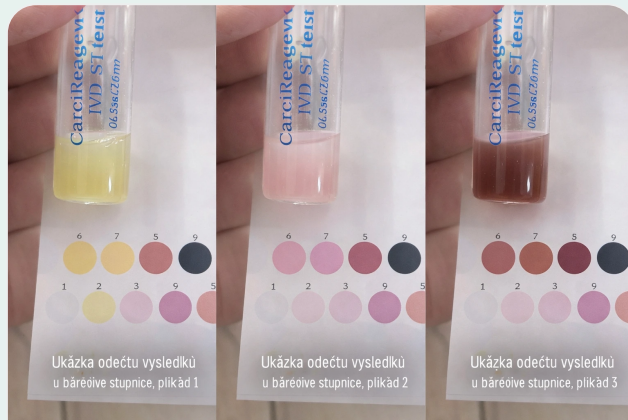


Ukázka odečtu: různé zbarvení vzorku (příklad 1-3). Porovnávej v **denním světle** a na **bílém podkladu**.

Tipy slouží pro správný odečet a porovnání se stupnicí. V případě obav nebo přetrvávajících potíží postupujte dle doporučení lékaře.

Porovnání vzorku se stupnicí Carci Reagent

Druhá ukázka pomáhá s vizuálním porovnáním výsledku se stupnicí. Opět platí, že správný odečet je vhodné provádět v denním světle a na bílém podkladu.

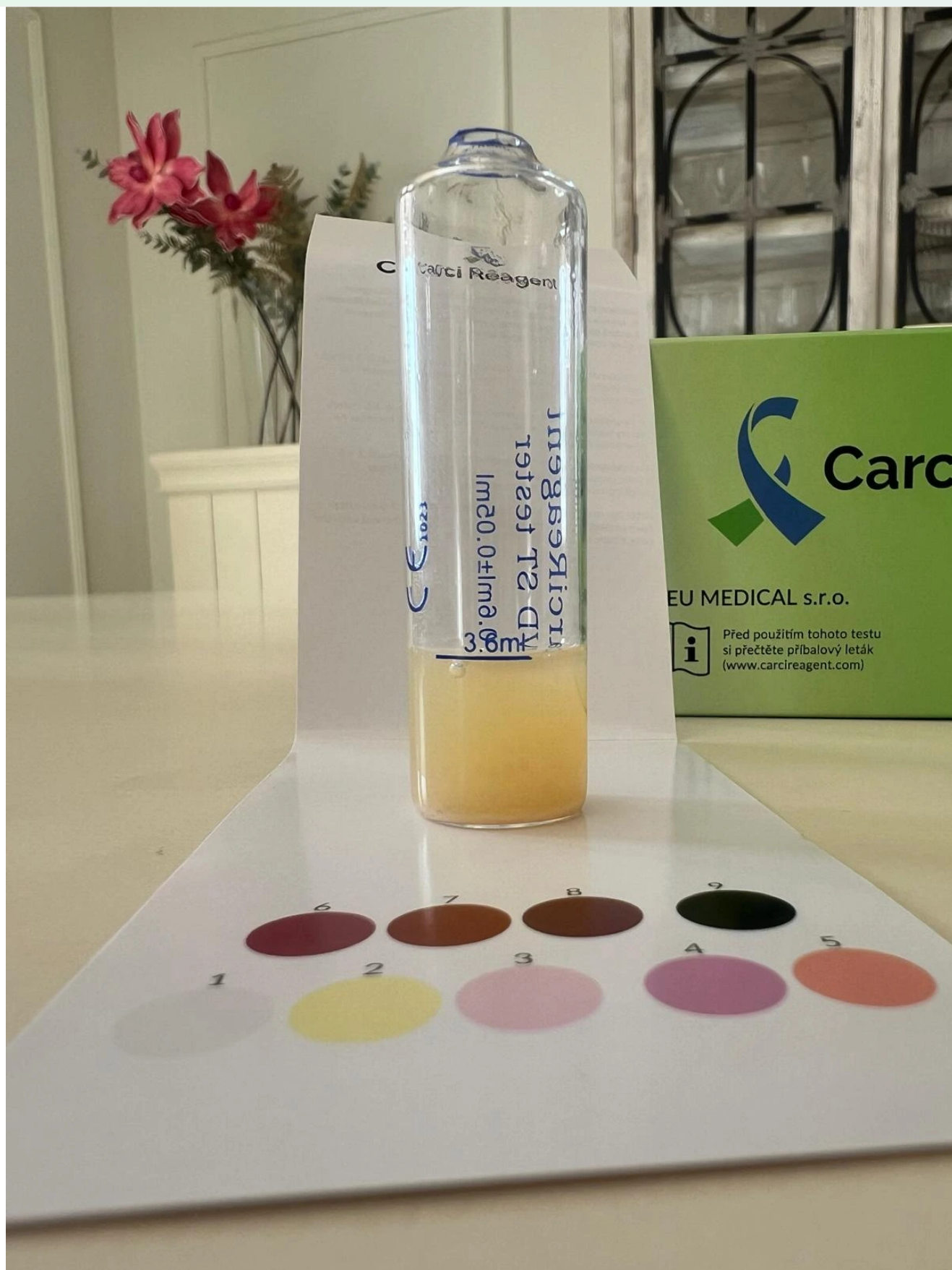

Praktická rada: Pokud si nejsi odstínem jistý, neodečítej výsledek zpětně z fotky po delší době. Spolehlivější je test zopakovat ve správných podmínkách.

Carci Reagent je určen k orientačnímu domácímu použití podle návodu výrobce. PDF vzniklo z dodaného obsahu pro snadné stažení a tisk.